



美加华医疗
MEDIKA



C/CT型 一次性使用营养泵管 使用说明书

针式（带冲洗）营养泵管

浙江美加华医疗技术有限公司



工作原理

与鼻饲管、胃管或造瘘管相连，通过营养泵对硅胶管旋转挤压，将营养液输送至患者肠胃。




产品性能

主要性能符合YY 0483-2004 一次性使用肠内营养导管、肠给养器及其连接件设计与实验方法。



使用说明

- 1.使用前检查产品单包装袋是否有破损，如单包装有破损，请勿使用。
- 2.打开包装袋，取出营养泵管。
- 3.关闭管路上开关夹（如有）。
- 4.取下插瓶针护帽，将插瓶针插入带有软塞的营养液瓶或营养液袋，或经通用型接口（如有）连接到营养液瓶。
- 5.将营养液瓶或营养液袋挂起。
- 6.将所需的适量冲洗液自加药口装入冲洗袋中。
- 7.关闭加药口并将冲洗袋挂起。
- 8.按照肠内营养泵使用说明书，将滴斗或防自流阀固定到泵相应的卡座内，并将硅胶管拉紧绕过泵的转轮，再将二通接头固定至泵的另外一侧卡座内（需确保各部件安装到位，或参见肠内营养泵显示器页面提示）。
- 9.打开管路上开关夹（如有），将管路上流量调节器（如有）调至最大，并取下管路末端连接件上的护帽。
- 10.按照肠内营养泵使用说明书，预灌注营养泵管，使整个管路充满营养液，排空管路内的气泡。如有滴斗，滴斗内液面控制在1/3处以下。
- 11.将管路末端连接件与肠营养导管（如鼻饲管等）接头相连接。
- 12.开始进饲肠内营养液。
- 13.营养液进饲过程中，可按如下步骤通过Y阀加药口或一体式三通（如有）给予液体药物或冲洗管路，不必拆下肠营养导管（如鼻饲管等）。
 - 暂时停止营养泵工作。· 用15-30ml无菌生理盐水或无菌水经过Y 阀加药口或一体式三通（如有）冲洗管路。· 用注射器自Y 阀加药口或一体式三通（如有）入口注入药液。
 - 再次用15- 30ml无菌生理盐水或无菌水经过Y阀加药口或一体式三通（如有）冲洗管路。
 - 启动营养泵继续喂养。

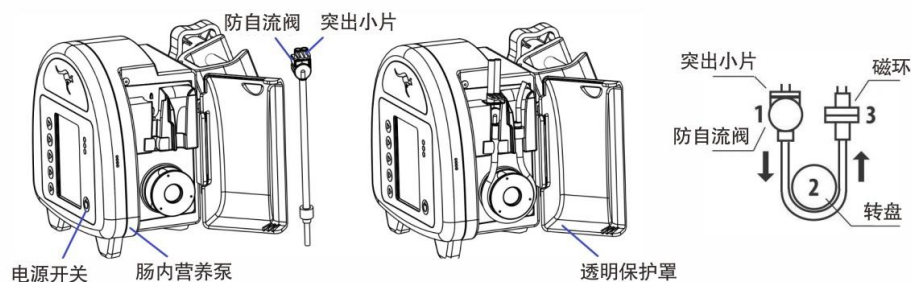

注：

- ①黑色转盘，显示器，控制面板，蓝色或紫色透明保护罩均为肠内营养泵部件，肠内营养泵不包含在本产品中。
- ②一次性使用营养泵管能承受肠内营养泵的最大工作压力为103KPa。
- ③本产品不含DEHP



禁忌症

3个月以内婴幼儿和肠梗阻、上消化道出血、严重吸收不良综合症、腹腔内感染、短肠综合症等肠道完全休息的患者均不推荐使用。



注意事项、警示及说明

- 1.产品只限一次性使用，打开包装直接使用，若包装破损，禁止使用。
- 2.本产品操作使用时应为具有相关资质的专业医务人员。
- 3.灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，在包装未打开前或破损前均为无菌，严禁二次灭菌使用。
- 4.在使用过程中，应适时的监测使用情况，如有漏液或其他意外情况，立即停止使用，并由医务人员妥善处理。
- 5.生产日期，生产批号和使用期限见包装袋。产品超过使用期限，不得使用。使用后请按医院规定及时销毁。
- 6.此装置仅用于进饲肠内营养液。建议至少每24小时更换一次营养泵管。



贮存方法

- 1.本产品应贮存在相对湿度不超过80%，无毒、无腐蚀性气体和通风良好的室内，并对营养泵管有充分的保护。
- 2.本产品运输时应防止重压、阳光直晒和雨雪浸淋。



生产日期

生产日期见产品标签



使用期限

二年

• 标签、标示的图形、符号、缩写说明

名称	符号	说 明
不得二次使用		说明产品不能二次使用
查阅使用说明		用户需要查阅使用说明
无 菌		表示医疗器械经过灭菌
经环氧乙烷灭菌		表示医疗器械经环氧乙烷灭菌
批次代码		表示制造商的批次代码，以便识别批次或组
有效期		表示医疗器械在符号后面的日期之后不得使用
生产日期		表示医疗器械的生产日期
不含 DEHP		表示医疗器械的材料不含 DEHP
不含乳胶		表示医疗器械的材料不含乳胶

生产许可证编号

浙食药监械生产许20200008号

产品技术要求编号

浙械注准20202140048

产品注册证号

浙械注准20202140048

产品名称

一次性使用营养泵管

产品型号

详见产品规格及配置表

注册人/生产企业

注册人/生产企业名称：浙江美加华医疗技术有限公司

注册人/生产企业住所：浙江省衢州市芳桂中路19号6幢2号

生产地址：浙江省衢州市芳桂中路19号6幢2号

注册人/生产企业联系方式：0570-8016567

售后服务单位：浙江美加华医疗技术有限公司

售后服务单位地址：浙江省衢州市芳桂中路19号6幢2号

售后服务单位联系方式：0570-8016567

适用范围

用于向胃肠内输送营养液

说明书编制日期

2018/04/30

说明书修订日期

2022/03/30